Dossier informativo

Ellipse®



- Fotodepilación
- Foto- rejuvenecimiento

Dossier informativo distribuido y editado por:



Trabajamos con ELLIPSE I²PL, luz intensa pulsada de 2^a generación, clínicamente probada segura y efectiva a largo plazo.

- Eliminación del vello no deseado en la modalidad de fotodepilación.
- Eliminación de manchas y regeneracion del colageno en la modalidad de foto-rejuvenecimiento.



Fotodepilación: ¿Por qué elegir Ellipse?

Ellipse es un sistema de Fotodepilación que ofrece diferentes avances y ventajas respecto a otros equipos. Posicionándose actualmente en uno de los mejores del mercado.

Su valor diferencial reside en la luz doblemente filtrada, tanto en el disparador como en el equipo. Con ello, se evitan posibles riesgos de quemaduras no deseadas y efectos colaterales.



Fotodepilación: ¿Por qué resulta efectiva?

La energía lumínica es transmitida o absorbida por la melanina la cual es la vía de conducción a la base del bulbo piloso, generando calor suficiente para la destrucción selectiva del mismo.

Para lograr este objetivo trabajamos tres parámetros:

- Longitud de onda
- Duración del pulso
- Fluencia correcta J/cm²

Trabajando profesionalmente estos parámetros se logrará la destrucción del bulbo sin dañar el tejido circundante.

Ellipse[®]

Imagina no volver a depilarte


Fotodepilación: ¿Cómo trabajamos Ellipse?

Principalmente necesitamos pelo en folículo piloso con el propósito de poder absorber y transportar la luz a través de la melanina. (vía de conducción al bulbo).

El vello y bulbo son calentados a una temperatura de 70° durante un mínimo de 1ms, mediante el disparo de luz.

A causa de esta acción, el folículo piloso será dañado y consecuentemente, erradicado.

Los vellos en fase anágena temprana son más susceptibles al efecto de Ellipse I²PL y es sólo en esta fase, donde el tratamiento es completamente efectivo.

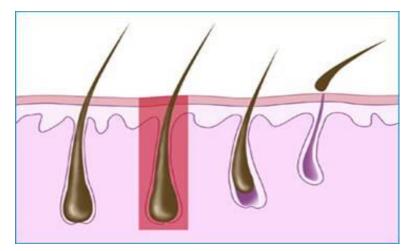

Fases crecimiento del vello



Fotodepilación: Nuestra empresa, Nuestro objetivo

Nuestra empresa, consciente de la necesidad de trabajar el mayor número de folículos en fase anágena, estudia los tratamientos y los personaliza adecuadamente a cada cliente.

Nuestro mayor objetivo, ofrecer un servicio óptimo, por ello realizamos los tratamientos en función de los tiempos de espera estipulados en cada zona. Con el fin, que el tratamiento sea lo más efectivo posible.

Estudiamos cada caso y conseguimos un éxito total, utilizando el mínimo de sesiones posibles (4 o 6 sesiones).



Fotodepilación: Nuestra empresa, Nuestro objetivo

Ejemplos:

Ingles o axilas: se realizaran cada 7-9 semanas (mes y medio-2 meses) aproximadamente las 2-3 primeras sesiones alargándose 15-20 semanas (3-4 meses) las consecutivas.

Nunca es trabajada una zona si el pelo no ha salido aun.

Piernas, tronco, brazos etc.: Se realizaran cada 15-17 semanas (3-4 meses) aproximadamente las 2-3 primeras sesiones alargándose a 15-20 semanas (4-5 meses) las consecutivas.

Estos tiempos pueden variar de un cliente a otro.

Ellipse®

Foto-rejuvenecimiento dérmico



Foto-rejuvenecimiento dérmico

¿Es doloroso?

La tolerancia al dolor es variable de una persona a otra. No es necesaria anestesia y la mayoría de los clientes lo describen como una sensación de calor, parecido a lo que uno siente después de pasar un día tomando el sol en la playa. A piel menos clara, menos sensibilidad.

¿Debo tomar precauciones antes o después del tratamiento?

La luz usada es absolutamente segura. Es luz visible y doblemente filtrada. Las longitudes de onda dañinas han sido eliminadas por el sistema de doble filtrado que exclusivamente posee el sistema Ellipse l²PL.



Foto-rejuvenecimiento dérmico

El rejuvenecimiento dérmico está basado en la absorción de luz por parte de la melanina y hemoglobina. La luz usada es absolutamente segura y al igual que en fotodepilación, doblemente filtrada. Las longitudes de honda dañinas son eliminadas gracias a este sistema que posee exclusivamente Ellipse.

El objetivo del tratamiento Ellipse l²PL:

- •Lesiones de pigmentación superficiales (pecas, o lentigos solares y melasmas superficiales).
- Rojeces (en las que no se distinguen venas individuales).
- No es posible tratar la telangiestasias. (varices).



Foto-rejuvenecimiento dérmico

Si la piel esta bronceada esta absorberá más luz, lo que hace el tratamiento menos efectivo. Se recomienda el uso de protección solar mínima SPF 30 durante las semanas anteriores y posteriores al tratamiento.

Cuanto mas clara es la piel, mas pronunciado es el contraste entre las alteraciones antiestéticas a tratar en la piel, haciendo el tratamiento más ventajoso.



Foto-rejuvenecimiento dérmico

En numerosos clientes se da una mejora de la textura de la piel.

Las áreas indicadas para el tratamiento son el rostro, cuello, escote y manos. La superficie de la lámpara, es de 5 cm2. Por lo tanto, una gran zona puede ser tratada con un solo flash de luz.

Un tratamiento facial completo requiere menos de 20 min. Para obtener un resultado óptimo son recomendadas entre 1 y 3 tratamientos. Pudiéndose realizar las sesiones cada mes. (regeneración celular).







No pensamos en vender mas sesiones, sino en conseguir los mejores resultados con las sesiones justas y necesarias para cada cliente.

Evite ofertas y tratamientos realizados cada mes, o que no cumplan los tiempos de espera estipulados, ya que la consecuencia de realizar tratamientos tempranos, implica que la zona este ausente de vello por lo tanto, éste, no este todavía en fase anágena temprana.

Por lo tanto es CONSUMIR SESIONES INECESARIAS.



La base de un tratamiento exitoso

Personal: es clave y fundamental que el personal que trabaja, manipula y dirige las sesiones, este dotado de extensos conocimientos y este altamente cualificado. Con ello se consigue y asegura que la persona que realiza los tratamientos, los adapta correctamente a cada cliente. Este personal es el único capaz de conseguir una efectividad absoluta, rigiéndose en el estudio personalizado y programando cuidadosamente los parámetros con seguridad y profesionalidad. Con mas de 20 años en el sector somos testigos de la importancia de una buena formacion, es común encontrarse personal a cargo de equipos sin conocimientos suficientes para ejercer tratamientos eficientes y eficaces.



La base de un tratamiento exitoso

-Equipo: en este apartado tratamos la clave fundamental en la base de la fotodepilación. El equipo, es la parte clave, los equipos de bajo coste que ofrecen servicios muy económicos, nunca podrán ofrecer y garantizar un resultado comparable a los realizados por nuestra empresa. Éstos equipos no tienen la potencia suficiente para lograr la destrucción del bulbo, por ello sus resultados son habitualmente poco satisfactorios.



La base de un tratamiento exitoso

A diferencia de otras empresas nuestro personal no es rotatorio y cada cliente es atendido por la persona especialista que comenzó y asesoró su tratamiento, desde el principio a fin.

Nuestra empresa forma un equipo entre l²LP y su personal, un equipo fuerte, que persigue y consigue el éxito con cada cliente.

Ellipse®

Anexos



Anexos: publicación en la Web CENTRO MÉDICO TEKNON

DERMATOLOGÍA - <u>Las manchas solares ya se</u> pueden eliminar de forma fácil

Última actualización de la noticia:

07/03/2007

Fotografía por: kevinrosseel

La acción del sol y los efectos de la edad favorecen el fotoenvejecimiento. Es decir, la aparición de manchas solares y lesiones pigmentarias sobre todo en cara, cuello y escote.



Para eliminar estas imperfecciones hoy se aplica un nuevo tratamiento con luz pulsada llamado IPL ELLIPSE. Este ofrece resultados muy satisfactorios y en la mayoría de casos tan sólo se requieren dos sesiones.

IPL son pulsos de luz intensa. Es un tratamiento rápido, sencillo y con un periodo de recuperación muy rápida. Se puede tratar cualquier parte del cuerpo que esté afectado por fotoenvejecimiento pero sobre todo la cara y el cuello. Así lo explica la doctora Eva Ciscar, directora médica del servicio de fotomedicina del Centro Médico Teknon.

"Los resultados se basan en cambios de la piel borrando manchas y venitas".

Habitualmente sólo se hacen dos sesiones con intérvalos de un mes. En la primera se obtiene el 70% del resultado.

Ellipse[®]

Anexos: Articulo publicado en la revista ZOOM



Ellipse®

Anexos: Articulo publicado en la revista ELLE

CHICO BOILE


9 VELLO FACIAL

Mayor efectividad

EL PROBLEMA El vello de las axilas y las ingles se elimina definitivamente en el 90% de los casos con láser, pero el facial, por ser hormonal, no hay manera de erradicarlo –puede rebrotar si bajan los estrógenos y la progesterona. Y si se te ocurre eliminarlo con pinzas, activas los folículos pilosos vecinos y te salen más pelitos.

LO ÚLTIMO Aunque se sigue sin poder hablar de depilación definitiva en la cara, existe una nueva generación de equipos de luz pulsada intensa (IPL), distintos al láser, que son capaces de tratar todo tipo de pelo y piel, y de eliminar en tres sesiones el vello más grueso y oscuro del mentón –la pelusa fina se resiste—. Expertos en láser, como la Dra. Josefina Royo se decentan por el novedoso equipo Ellipse porque «con menos potencia elimina más cantidad y es más seguro». También trata las manchas, las lesiones vasculares y los tatuajes.

TEN EN CUENTA Exige que te hagan una prueba de eficacia previa para ver cómo respondes al tratamiento y sopesar si realmente te compensa. Además, pide un presupuesto cerrado con una cobertura que te permita un seguimiento mínimo de cinco años. Y asegúrate de que te está tratando un médico con una experiencia de al menos dos años en depilación con láser.

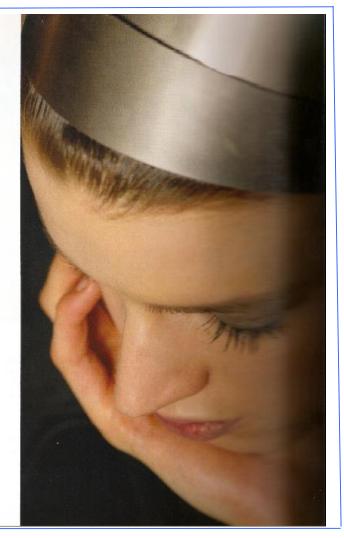



Anexos: Articulo publicado en la revista CIRUGIA ESTETICA

CIRUGIA ESTETICA

Las manchas solares ya se pueden eliminar de forma fácil

20-04-2008 14:02:43



La acción del sol y los efectos de la edad favorecen el fotoenvejecimiento. Es decir, la aparición de manchas solares y lesiones pigmentarias sobre todo en cara, cuello y escote.

Para eliminar estas imperfecciones hoy se aplica un nuevo tratamiento con luz pulsada llamado IPL ELLIPSE. Este ofrece resultados muy satisfactorios y en la mayoría de casos tan sólo se requieren dos sesiones. IPL son pulsos de luz intensa. Es un tratamiento rápido, sencillo y con un periodo de recuperación muy rápida. Se puede tratar cualquier parte del cuerpo que esté afectado por fotoenvejecimiento pero sobre todo la cara y el cuello. Así lo explica la doctora Eva Ciscar, directora médica del servicio de fotomedicina del Centro Médico Teknon.

"Los resultados se basan en cambios de la piel borrando manchas y venitas".

Habitualmente sólo se hacen dos sesiones con intérvalos de un mes. En la primera se obtiene el 70% del resultado.

En principio, no puede tratar pieles muy oscuras o personas que se han expuesto recientemente a rayos



Anexos: Articulo publicado en la revista EL CUERPO

OCTUBRE 2008





Actualidad

IPL de segunda generación

el cuerpo

Luz para las manchas solares.



La utilización de "Luz Pulsada" es la técnica más novedosa, en la actualidad, para atenuar con éxito y en pocas sesiones pecas, manchas solares, lesiones pigmentarias propias de la edad, etc.

El innovador tratamiento IPL Ellipse es el más potente del mercado y ofrece muy buenos resultados a veces en tan sólo 2 sesiones.

Es un tratamiento rápido, no invasivo y con un periodo de recuperación mínimo.

Se puede tratar cualquier región corporal que presente fotoenvejecimiento. Aunque lo más frecuente es tratar cara, escote, manos, cuello, que son las que están más expuestas al sol. El principio de funcionamiento de este equipo es la fototermólisis selectiva, es decir que la luz penetra en la piel y actúa únicamente sobre la lesión, sobre la mancha o el baso que se quiere eliminar, sin afectar a la epidermis, guedando la piel intacta.

Es un tratamiento muy **rápido**, prácticamente **indoloro** y que **no precisa anestesia**.

El objetivo de esta técnica es aumentar la producción de colágeno y eliminar las lesiones epidérmicas. La luz penetra en la piel estimulando la producción de nuevo colágeno, borrando las manchas y venitas.

Las sesiones duran entre 15 y 20 minutos y la frecuencia de aplicación es mensual.

El 70% del resultado se observa en la primera sesión. En principio el tratamiento no se puede aplicar en pieles muy oscuras o muy bronceadas.

El IPL (luz pulsada intensa) Ellipse es un modo de IPL de segunda generación muy superior al IPL convencional. Este nuevo sistema se conoce como IPL2.



Telefonos de contacto:

Dep. Administracion: 647 78 28 43

Dep. Formacion: 670 55 13 55

Telf fijo y fax: 0034 938 314 443



PRECIOS aproximados FOTO-REJUVENECIMIENTO DERMICO

 FACIAL
 Entre 200 - 300 €

 FACIAL + CUELLO
 Entre 250 - 350 €

 FACIAL + CUELLO + ESCOTE
 Entre 300 - 450 €

 Dorso de las manos
 Entre 120 - 250 €

El precio individual del un disparo de foto- rejuvenecimiento dérmico es de 10 €