



Cuídate

Tratamiento de Fotorrejuvenecimiento

Antes del tratamiento




Cortesía
Dra. Agneta Troilius

Después del tratamiento



Cortesía
Dra. Agneta Troilius

Antes del tratamiento

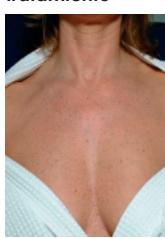

Cortesía
Dra. Agneta Troilius

Después del tratamiento



Cortesía
Dra. Agneta Troilius

Consulta www.ellipse.org para ver más fotos que demuestran la efectividad de Ellipse I²PL.



www.ellipse.org

Ellipse Spain S.L.
C/ Miramarges, 7, 1-5
08500 Vic - Spain

Tel 938 836 340
Fax 938 836 339
infospain@ellipse.org



Ellipse es fabricante de sistemas de luz basados en soluciones médicas y cosméticas. Ellipse se ha ganado la confianza de doctores y esteticistas de todo el mundo por la calidad de sus productos y servicios.

Ellipse A/S. Todos los derechos reservados.



Tratamiento de Fotorrejuvenecimiento



CLINICAMENTE PROBADO

SEGURO Y EFECTIVO

I²PL

La mayoría de la gente desea mantener una piel joven y luminosa para siempre

Esto no es fácil, ya que la edad de la piel refleja el exceso de exposición al sol y la menor producción de colágeno. El tratamiento de Fotorrejuvenecimiento de Ellipse ayuda a mantener un aspecto joven y luminoso.

Los tratamientos faciales son los más comunes, pero cualquier parte del cuerpo puede ser tratada.

¿Cómo funciona el tratamiento de Ellipse?

La lámpara de destellos utilizada en el sistema Ellipse I²PL, es la única que cuidadosamente emite luz doblemente filtrada, para asegurar que solo la luz adecuada (longitud de onda) sea absorbida por la piel.

Las manchas epidérmicas causadas por el sol contienen melanina y las rojeces difusas contienen hemoglobina. Cuando células que contienen melanina o hemoglobina reciben esta luz se calientan y se eliminan en pocos milisegundos, consiguiendo que la alteración epidérmica sea menos perceptible.

¿Quién puede tratarse?

Debido a que el Fotorrejuvenecimiento está basado en la absorción de luz por parte de la melanina y la hemoglobina, los tratamientos son más eficaces en clientes con piel clara y que no estén bronceadas en el momento del tratamiento.

¿Cuánto tiempo lleva realizar un tratamiento de Ellipse?


Un tratamiento facial completo requiere menos de 20 minutos. Para obtener el resultado deseado son recomendados entre 1 y 3 tratamientos.

¿Es doloroso?

La tolerancia del dolor es muy variable de una persona a otra. No es necesaria anestesia alguna y la mayoría de los clientes lo describen como una sensación de calor, parecido a lo que uno siente después de pasar un día tomando el sol en la playa. A piel más clara menos sensibilidad.

¿Debo tomar precauciones antes o después del tratamiento?

Debido a que el bronceado consiste en acumulación de pigmento (melanina) en la piel es importante evitar el bronceado (tomar el sol, solarium o cremas bronceadoras) antes y durante el tratamiento. Ya que si su piel está bronceada ésta absorberá más luz, lo que hará el tratamiento menos efectivo.

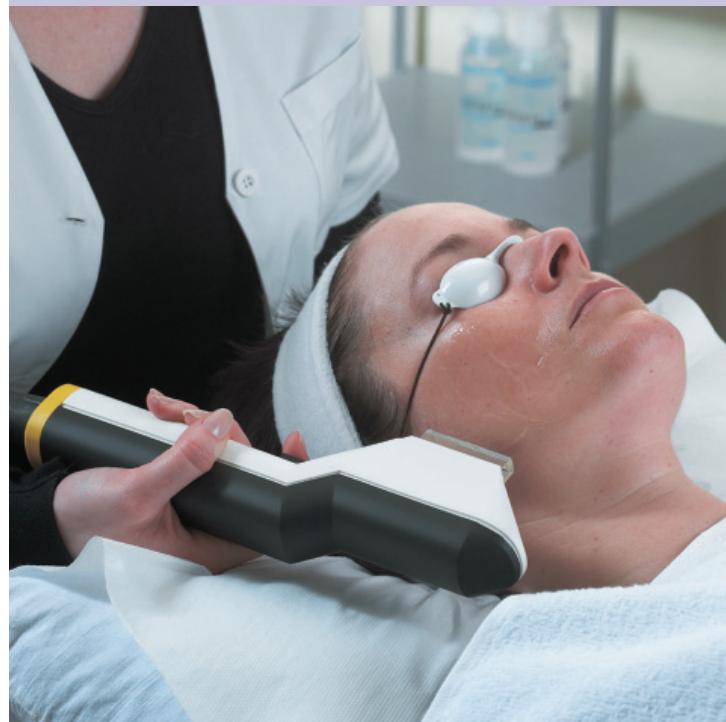

Generalmente no es necesario un cuidado postratamiento. Además se recomienda el uso de cremas de protección solar (min. SPF 30), aconsejable Hydrating Sun Screen SPF 30 (125 ml.) de Intense by Ellipse, durante las semanas anteriores y posteriores al tratamiento.

¿Qué debo esperar del tratamiento?

Justo después puede parecer que la piel está "sucia" durante los días posteriores al tratamiento, debido a la oxidación de la melanina. Posteriormente la piel muestra más tersura, luminosidad y frescor. Para mantener esta piel rejuvenecida es aconsejable realizar entre 1 y 2 tratamientos al año.

¿Cómo podemos estar seguros de que Ellipse es seguro y efectivo?

Varios Dermatólogos han realizado distintos Estudios Clínicos antes del lanzamiento del producto, documentando así la seguridad y efectividad de Ellipse. Los resultados de estos estudios son publicados en las más prestigiosas y respetadas revistas médicas. Puede consultar esta documentación científica en la web de Ellipse: www.ellipse.org.